



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Стоматологический пескоструйный аппарат на две фракции песка Jinguang JG-218



Версия 1.0

minicam24.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Характеристики	3
Использование	3
Устранение неисправностей	3
Меры предосторожности	4

2

Введение

Этот аппарат является незаменимым оборудованием для ортопедической стоматологии и в основном используется для удаления всех видов мельчайших поверхностных оксидов.

Характеристики

Напряжение: 220 В, 50 Гц; 110 В, 60 Гц;

Мощность: 10 Вт;

Сила давления: 4 кг или выше;

Размер песчинок: 100-120 мкм;

Использование

1. Сначала плотно и прочно вставьте все трубки в их соединения.
2. Вставьте шнур питания и провод педального переключателя в соответствующие гнезда и подключите источник питания.
3. Отвинтите две крышки резервуара для песка. Заполните песком на половину высоты банки, иначе это повлияет на эффект пескоструйной обработки.
4. Опустите педальный переключатель, отрегулируйте клапан регулирования давления, аппарат может работать, когда давление превышает 4 кг. Отрегулируйте реверсивное управление левой и правой ручкой.
5. При высыпании песка из аппарата отвинтите винт непосредственно под ним и поднимите аппарат, и песок естественным образом вытечет из отверстия.

Устранение неисправностей

Возможно, песок низкого качества.

Пожалуйста, проверьте, достигает ли давление в аппарате более 4 кг. Сначала отрегулируйте клапан регулирования давления, а затем проверьте, не насыпано ли песка в контейнер слишком много или слишком мало. Когда манометр показывает давление, но из ручки не идет песок, значит, она была закупорена. Отвинтите стопорную планку перед держателем ручки для

3

очистки, затем нажмите педальный переключатель подачи воздуха и, наконец, отвинтите стопорную планку.

Меры предосторожности

1. При использовании оборудования вы должны всегда уделять внимание очистке от пыли, в противном случае это приведет к плохому контакту с электроприборами и повлияет на нормальное использование и нормальную очистку.
2. Для достижения наилучшего эффекта очистки песком количество песка в резервуаре для песка не должно превышать половины объема резервуара для песка.
3. Использованный песок нельзя использовать повторно во избежание закупорки ручки.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

4